

Titel
Vervoerskisten

Verzendlijst
Origineel: Zenya (Documentbeheersysteem) Kopie: Website

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
2 jaarlijkse evaluatie, geen wijzigingen.

Geldig document; geprinte versie is een "onbeheerde kopie"

Benodigheden:

Vervoerskist, koolit bricks, handplaat , sealbag, absorptiepapier, klem.

Plaats onder in de kist de koelelementen (zie 3705 Temperatuurcriteria externe bloedafname).	
Plaats de handplaat in de sealbag, vervolgens sealbag+handplaat in vervoerskist plaatsen.	
Plaats voldoende absorptiepapier (dient de inhoud van de primaire houders volledig te absorberen) op de handplaat. Indien geen handplaat aanwezig dan absorptiepapier onder in sealbag plaatsen. Nb. het kan voorkomen dat de handplaat niet in de sealbag geplaatst wordt (mn. in de kleine vervoerskisten m.b.t. hoogte afnamemateriaal (o.a. bloedkweken)).	
Plaats al het materiaal in de sealbag (buizen in rekjes (altijd rechtop vervoeren), urinepotjes speciaal in afsluitbare zakjes). Draag er zorg voor dat het bloed niet los in de vervoerskist gelegd wordt mn. onderzoek voor stolling (o.a. INR). Let op dat lange afnamebuizen niet aan de rand geplaatst worden, dop kan tempex afdichting raken.	

Sluit de sealbag met de rode klem, zie instructies. Haal de overtollige lucht uit de sealbag. Het is niet de bedoeling dat de sealbag gedicht wordt met de plakstrip, alleen dichtmaken met de klem.




Aanvraagformulieren bij voorkeur in afsluitbare hoezen (met zipsluiting), buiten de sealbag plaatsen.

Sluit voor vervoer de deksel. Alle attributen dienen in de vervoerskist te blijven (voor hergebruik). Het enige wat uit de vervoerskist gehaald wordt is het diagnostisch materiaal.




NB. Indien je een pot krijgt met "radioactief" erop (meestal klier/lump) dan mag dit ook vlgs. klasse 6.2 vervoerd worden (P650 UN3373) in de vervoerskisten (onder de vrijstellingsgrens). Het gaat hier om het stofje Technetium 99m.
Zie SOP [4983 vervoer diagnostisch materiaal](#)

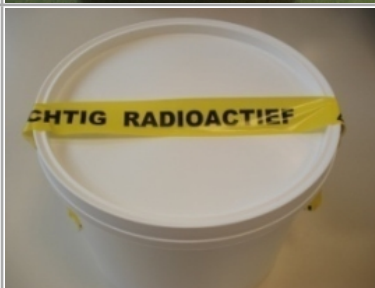


De verzender (verantwoordelijkheid) ziet erop toe dat het materiaal volgens de richtlijnen juist verpakt wordt.

Instructie gebruik van de sealbag met klem:

Versandsystem zur Beförderung Diagnostischer Proben der Stoffklasse UN 3373

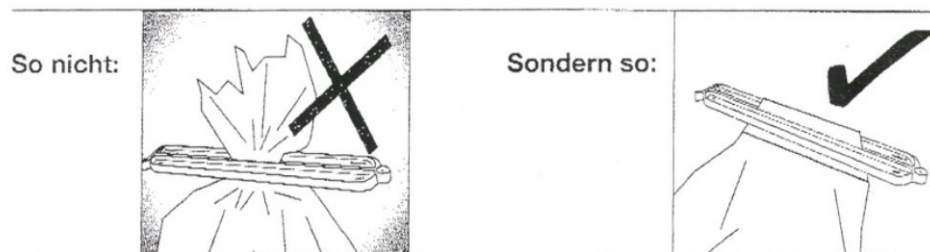


Verschlussprinzip:

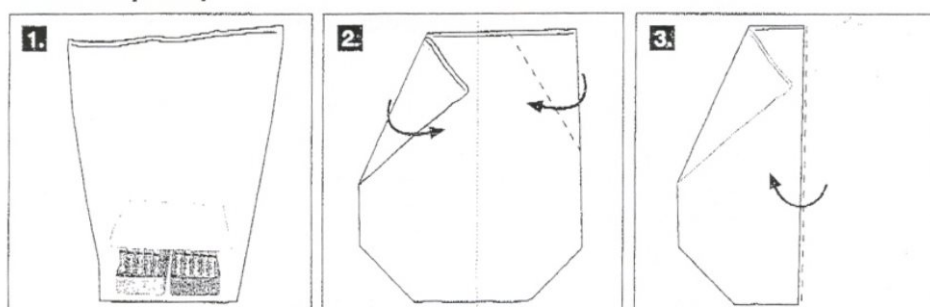

Nach Einfügen des Probenmaterials in den Polybeutel (mit einer Saugelinie ausgestattet) muss der Polybeutel unbedingt wie im folgenden erklärt verschlossen werden:

Die Ecken an der Öffnungsseite wie oben gezeigt Richtung Mitte des Polybeutels falten.

Dann die eine auf die andere Hälfte des Polybeutels falten.

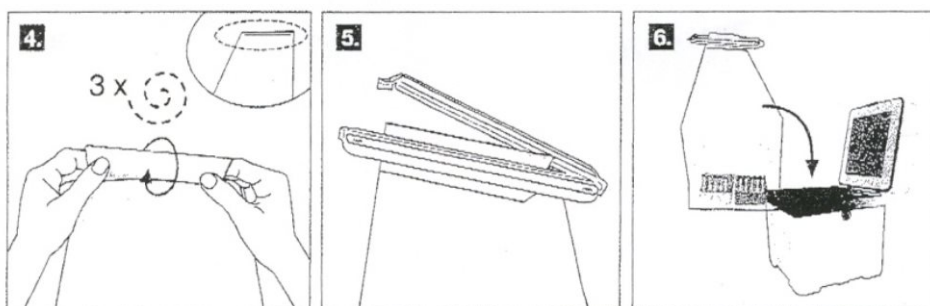

Den so entstandenen schmalen Öffnungsbereich 3 x ineinander rollen.

Dann den Verschluss-Clip wie oben dargestellt anbringen und festclippen.

Der Polybeutel ist nun korrekt verschlossen und kann in den Transportkoffer verpackt werden.

nungen vorbehalten