

Titel
Urine-feces-semen

Verzendlijst
Origineel: Zenya (Documentbeheersysteem) Kopie: Website

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
2 jaarlijkse evaluatie. Potje met groene deksel en met gele deksel verwijderd. Vidavi vervangen door Zorg ERP

Geldig document; geprinte versie is een "onbeheerde kopie"

Urine

Materiaal



Urine potje blauwe deksel (portie)
(Locatie E-02-095 Laboratorium/ E-00-173 poli Bloedafname)



Bokaal (24 uurs urine)
(Locatie E-02-109 Magazijn/E-00-161 poli Bloedafname)



BD Vacutainer Z (urine voor buizenpost)
(Locatie E-02-099 Urinelab)



Urinepotje voor zware metalen
(Locatie E-02-077 Prikkarren)

Onderzoek
van / op

Bepaling

Hoeveelheid

Bepaling

Hoeveelheid

	Albumine (micro)	P (min. 2 ml.)/24u.		Kreatinine	P (min. 2 ml.)/24u.
	Amylase	Alléén P (min. 2 ml.)		Kreatinine-klaring ¹	Alléén 24u.
	Bence Jones	P (min. 20 ml)/24u.			
	Calcium	Alléén 24u.*		Magnesium	24 u.
				Micro-albumine	P (min. 2 ml.)/24u.
	Chloor	P (min. 2 ml.)		Microbiologie	Zie bijlage microbiologisch onderzoek
	Drugs-screening	P (min. 10 ml.)		Natrium	P (min. 2 ml.)/24u.
	Dysmorfe erythrocyten	Alléén P (min. 6 ml.), verse urine!		Sediment	Alléén P (min. 6 ml.)
				Strip***	Alléén P (min. 6 ml.)**
	Eiwit	P (min. 2 ml.)/24u.		Ureum	Alléén 24u.
	Fosfaat	Alléén 24u.		Urinezuur	Alléén 24u.
	Kalium	Alléén 24u.		Zwangerschapstest	Alléén P (min. 1 ml.)
				Zware metalen	P (min. 30 ml.)
Opmerking	P = portie urine en 24u. = 24 uurs urine Indien materiaal niet meteen gebracht kan worden, bewaren in de koelkast. M.u.v. urine voor dysmorfe erythrocyten, deze moet meteen naar het laboratorium gebracht worden.				

¹ **stolbloed (gele buis)** afnemen bij einde sparen urine (uitslag kreatinine geldig <24 uur, voor een internist tot 5 dagen voor inleveren urine).

Patiëntenfolder LAB006 "24-uurs urine verzamelen" wordt als informatiefolder aan de patiënt meegegeven. Ook in te zien op de website van het Maasziekenhuis => www.maasziekenhuispantein.nl
=> Onze zorg>Folders en video => Urine verzamelen, 24 uurs.
Informatie heeft betrekking op albumine, calcium, chloor, eiwit, fosfaat, Bence-Jones, Kreatinine + kreatinine-klaring, kalium, natrium, ureum en urinezuur.

Urine dient verzameld te worden in de hiervoor bestemde potjes / bokaalen. Te verkrijgen bij o.a. huisarts praktijk, laboratorium en apotheek.

* portie alléén na overleg met klinisch chemicus (geen referentiewaarden bekend).


** in overleg met klinisch chemicus (KC) in uitzonderlijke gevallen ook uit 24-uurs urine.

*** uitzondering pasgeborenen. I.o.m. aanvrager eventueel alleen strip i.v.m. moeizaam verkrijgen materiaal (plaszakje etc.)

Feces

Materiaal

Potje met blauwe (of bruine) deksel (of soortgelijk droog (urine)potje)

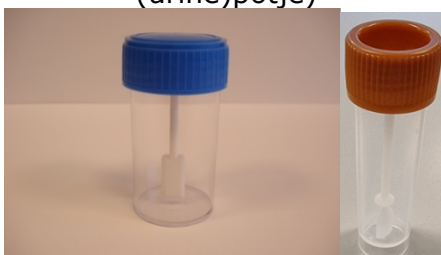

(Locatie E-02-077 Prikkarren/ E-02-099 Urinelab/ E-00-173 poli Bloedafname)



(Locatie E-02-095 Laboratorium/ E-00-173 poli Bloedafname)

Onderzoek van / op	Feces, helicobacter pylori, calprotectine
Afnamecondities / bewaren	Een goed gevulde schep feces in potje brengen (3-5 dagen na ontstaan van de symptomen is de beste verzameltijd). Bij voorkeur meteen analyseren na afname. Indien niet mogelijk mag monster 1 dag in de koelkast (KK9) bewaard worden.
Opmerking	Algemeen aanvraagformulier laboratorium Afnamemateriaal verkrijgbaar via Zorg ERP. Het is toegestaan om de feces in te leveren in een urine potje met een blauwe deksel, of in een semenpotje, mits de potjes schoon en droog zijn.

Semen

Materiaal	Steriel potje (rode deksel)  (Locatie E-02-109 Magazijn/E-00-173 poli Bloedafname)
Onderzoek van / op	Semen, controle vasectomie.
Afnamecondities/ bewaren	Informatie via poli urologie. Afnamecondities en bewaren staan in de patiëntenfolder. Op afspraak inleveren.
Opmerking	Afspraak nodig. Algemeen aanvraagformulier laboratorium. Uitsluitend op afspraak via telefoon 0485-846471. Patiënt mag zelf bellen voor afspraak. Patiëntenfolder: Spermaonderzoek na sterilisatie (LAB013). Vragenlijst D-121 Semenonderzoek invullen bij inleveren materiaal. Afnamemateriaal verkrijgbaar via laboratorium.

Materiaal	Steriel potje (rode deksel)  (Locatie E-02-109 Magazijn/E-00-173 poli Bloedafname)
Onderzoek van / op	Semen, semen volledig.

Afnamecondities/ bewaren	Patiëntenfolder "Fertiliteitsonderzoek semen" (LAB001) aan patiënt meegeven of toesturen, via laboratorium te verkrijgen (tevens opvraagbaar via website www.maasziekenhuispantein.nl => Onze zorg>Folders en video Afnamecondities en bewaren staan in de patiëntenfolder.
Opmerking	Uitsluitend op afspraak via telefoon 0485-846471. Patiënt mag zelf bellen voor afspraak. Algemeen aanvraagformulier laboratorium + patiëntenfolder Fertiliteitsonderzoek van sperma (LAB001). Vragenlijst D-121 Semenonderzoek invullen bij inleveren materiaal.