

Titel
Afnamemateriaal voor bloedonderzoek (bijl. 3)

Verzendlijst
Origineel: Zenya (Documentbeheersysteem) Kopie: Website

Wijzigingen t.o.v. vorige versie
2 jaarlijkse evaluatie. Verwijderd: Trident 2 studie bij de NIPT buis Toegevoegd: min. hoeveelheid 1.5 ml in 10 ml EDTA buis Bloedkweek: voor Radboud verwijderd

Geldig document, geprinte versie is een "Onbeheerde kopie"

Overzicht afnamemateriaal (bijlage document 3823 Monstermateriaal (afname) en afnamecondities

SST II buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma / Locatie
	3.5 of 5 ml.	Oker-geel	6x	BD Vacutainer SST tm II Advance Clot Act/gel	1010400 (3.5 ml) 1203989 (5.0ml) in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

RST buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma / Locatie
	5 ml.	Oranje	5-6x	BD Vacutainer Rapid Serum Tube Alleen afd. B1 uit PAC.	1257106 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) Afd. B1

EDTA buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	3 ml.	Lavendel licht	8 -10x	K ₂ E 5.4 mg. BD Vacutainer Minimale hoeveelheid 0.5 ml.	1010382 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

EDTA buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	4 ml.	Lavendel donker	8 -10x	K ₂ E 7.2 mg. BD Vacutainer Minimale hoeveelheid 0.5 ml. (alleen voor plasma doeleinden)	368861 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

EDTA buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	10 ml.	Lavendel donker	8-10x	BD Vacutainer K2E (EDTA) 18.0 mg Minimale hoeveelheid 1.5 ml.	1255042 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli Bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

Citraat buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	2.7 ml.	Lichtblauw	3 - 4x	9NC, 0.109M BD Vacutainer Minimaal tot vullijn (achterkant buis) vullen!! Nooit ontdoppen!	1010431 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH
NaF – Na ₂ EDTA buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	4 ml.	Grijs	8 -10x	NaF 6.0 mg. Na ₂ EDTA 12.0 mg. BD Vacutainer	1064668 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek

					MZH
--	--	--	--	--	-----

CAT buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	6 ml.	Rood	5 - 6x	CAT (Clot activator tube) BD Vacutainer	1010417 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

LH PST II	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	4.5 ml.	Licht groen	8 -10x	LH PST II gel BD Vacutainer Nooit ontdoppen!	1010390 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

Clot activator buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	10 ml.	Rood	5-6x	BD Vacutainer CAT (Clot activator tube) Alléén bij problemen bij bloedgroep/Rh- transfusie.	1251977 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

LH buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	6 ml.	Donker- groen	8 -10x	LH 102 I.U. (Lithium Heparin) BD Vacutainer	1210122 in Vidavi Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek

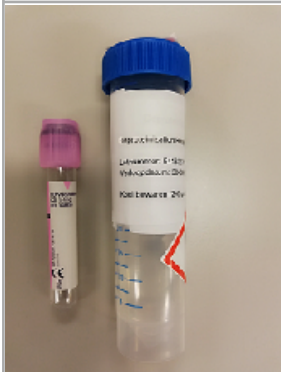
					MZH
--	--	--	--	--	-----

Sodium Heparine buis	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	6 ml.	Donkerblauw	8 -10x	5/10 NH Trace elements Sodium Heparin Greiner Bio-one 6 ml	Via bestelformulier AML (papier; lade secretariaat) of digitaal via www.aml-lab.be (e-formulieren, materiaalkaart) Locatie: E-02-077 (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname) Externe afname locaties / kliniek MZH

Cell-Free DNA BCT	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	10 ml.		10x	Cell-Free DNA BCT CE Streck Omaha,NE USA Onderzoek: NIP testle Tes	Bestelling bij firma Daklapack; zie document 12305 NIPT Locatie: E-02-089 kast (lab) 73.E.00.173 (poli bloedafname)

SST II buis en speciale buis AML met 3% metafosforzuur	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	500 µl serum bij 750 µl ijskoud 3% metafosforzuur	Okergeel	6x	BD Vacutainer SST tm II Advance Clot Act/gel + speciale buis AML met 3% metafosforzuur Onderzoek: Vit C	Bestellen Vit C buis: via bestelformulier AML (papier; lade secretariaat) of digitaal via www.aml-lab.be (e-formulieren, materiaalkaart) Locatie: Vit C buis: E-02-089 koelkast KV3 (lab) Okergele buis: zie

					SST II buis
--	--	--	--	--	-------------

EDTA buis + Deproteinization reagent	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	3 ml > 2.0 ml EDTA-bloed bij 1.0 ml Deproteinization reagent in een plastic buis (zie vademe-cum pyruvaat)	Paars	8 - 10x (zie vademe-cum pyruvaat)	K ₂ E 5.4 mg. BD Vacutainer + 1.0 ml Deproteinization reagent in een plastic buis Onderzoek: Pyruvaat	Bestelling telefonisch bij RLD: Radboud Lab voor Diagnostiek 024-3614777 Locatie: Deproteinization reagent: E-02-089 koelkast KV3 (lab) Lavendellicht buis: zie EDTA buis

Bloedkweek	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	Optimaal 8-10 ml.	Grijs/oranje	8x	Dopje eerst desinfecteren vóór afname. Aerobic/F en anaerobic/F (volwassenen) BD BACTEC plus + Bloedkweek Alléén afname intern MZH	1172074 in Vidavi of vragen bij SEH Locatie: 73.E.00.173 (poli bloedafname) Kliniek MZH

Bloedkweek	Hoeveelheid	Kleur	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	1 - 3 ml.	Rose	8x	Dopje eerst desinfecteren vóór afname. Peds plus/F (kinderen) Culture Vials (plastic) BD BACTEC Bloedkweek Alléén afname intern MZH voor Radboud.	1172067 in Vidavi of vragen bij de kinderafdeling Locatie: 73.E.00.173 (poli bloedafname) Kliniek MZH

Safe PICO Aspirator	Hoeveelheid	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	1.5 ml.	Enkele keren rustig rechtop draaien en daarna rollen tussen de handen (voorkom insluiting van luchtbellén).	60 I.U. electrolyte-balanced heparin. Gebruiken voor afname van: - arterieel - veneus - navelstrengbloed	1256866 in Vidavi 956-610 Radiometer Locatie: E-02-109 Kliniek MZH

Arterial Blood Collection Syringe	Hoeveelheid	Mengen	Opmerking	Bestelnummer/ Firma/ Locatie
	3 ml.	Enkele keren rustig rechtop draaien en daarna rollen tussen de handen (voorkom insluiting van luchtbellén).	Ca ²⁺ LH ~80 I.U. 3ml. Gebruiken voor afname op de fietspoli van: - arterieel - veneus Kan evt. gebruikt worden voor: - navelstrengbloed	Bestelling door de afdeling zelf

Opmerkingen

- Buis nooit bijvullen, indien buis niet goed volloopt deze ontdoppen. Geef dit aan op de buis dat deze ontdopt is. Citraatbuizen en LH PST II gel mogen **nooit** ontdopt worden.
- Buis nooit 2e keer aansluiten, neem een nieuwe afnamebuis.