

Bijlage procedure SOP	Code: 3778	Versie	16
		Publicatiedatum	14-02-2024
Schematisch overzicht analyses uit 1 buis (BPD/website)	Pagina 1 van 3	Controledatum	14-02-2026

Titel
Schematisch overzicht analyses uit 1 buis (BPD/website)

Wijzigingen		
Versie	Datum	Wijziging
15	14-02-2024	2 jaarlijkse evaluatie. APTT mag niet afgenomen worden (toegevoegd). Geheugenpoli an.fosfaat gewijzigd in alk. fosfatase.

Geldig document; geprinte versie is een "onbeheerde kopie"

Bijlage Procedure SOP	Code: 3778	Versie	16
		Publicatiedatum	14-02-2024
Schematisch overzicht analyses uit 1 buis (BPD/website)	Pagina 2 van 3	Controledatum	14-02-2026

Kolom 1 ALAT Albumine Alk.fosfatase Amylase Anti-CCP ASAT Bilirubine dir. Bilirubine tot. CA 15-3 CA 125 Calcium CEA Chloor Cholesterol CK Coeliakie (anti-htTG IgA + tot. IgA) CRP Estradiol Ferritine Foliumzuur Fosfaat (an.) FSH Gamma GT Haptoglobine HCG (tot. + β) HDL/LDL Hep.B antigeen (HBsAg) Hep.B antistof (anti-HBs) HIV (as + ag) IgA IgE IgG IgM IJzer Vervolg zie 2^o kolom (dezelfde afnamebuis).	Kolom 2 Vervolg 1^o kolom (dezelfde afnamebuis). Kalium Kreatinine eGFR (CKD-EPI) LD LH Magnesium Natrium Progesteron Prolactine PSA Reumafactor (RF) T ₃ T ₄ (vrij) Tot. eiwit TPHA Transferrine Triglyceriden TSH-screening TIJBC/verz Ureum Urinezuur Vit. B ₁₂ Vit. D	 Inhalatie allergenen (phadiatop) Voedselallergenen (Voedselmengsel) Allergenen 0-4 jaar (Phad. Infant) 1 grote stolbuis 5 ml. !	Lithium Paracetamol = acetaminophen Zie rest medicijnspiegels in het Vademecum. Ammoniak (alléén afname in MZH) 4 ml EDTA	Bloedbeeld Differentiatie Eosinofielen Hb/MCV Hb/MCV doortesten Hb/MCV/Leuco/Trombo Reticulocyten/IRF Trombocyten BSE
		ANA ENA anti ds-DNA 3.5 ml buis	Alcohol Niet desinfecteren vóór afname en afnamebuis niet ontstoppen!!	Bloedgr./Rh D Dir. Coombs Irr. Antistoffen (IRA) ** Kruisproef 4 ml EDTA
		Spijtserum Monospot = (Pfeiffer)	Parathormoon (PTH) 4 ml EDTA	** Transfusie (o.a. pos. IRA (opsturen LMI) Vacuette Vacuette
		BNP (binnen 7 uur na afname inleveren op lab.). 4 ml EDTA Glucose HbA1c doortesten (1 buis extra), indien aanvraag uit kolom 1 en/of 2 dan extra buis niet nodig!	Troponine I en Bicarbonaat (alléén afname in MZH)	PT PT (controle OAS) APTT * Fibrinogeen* D-dimeer* (*alléén afname in MZH)

Vademecum laboratorium

Voor meer informatie omtrent aangevraagd onderzoek (m.b.t. o.a. afnamemateriaal, afnamecondities, hoeveelheid):

<https://www.maasziekenhuispantein.nl/voor-verwijzers/vademecum-laboratoriumbepalingen/>

Voor overige vragen: ☎ 0485-846471

Uitleg blokken

Er wordt in blokken aangegeven wat er uit een volle buis kan worden bepaald. Worden er meerdere bepalingen aangevraagd en staan deze in hetzelfde blok dan is een volle buis voldoende. Worden er meerdere bepalingen aangevraagd welke in verschillende blokken staan, dan dient men overeenkomstig het aantal buizen af te nemen (bv. CEA en LD is 1 buis, LD +reumafactor (RF) 2 buizen). De achtergrondkleur van de blokken komt overeen met de kleur van de dop van de buis. Verzendbepaling altijd aparte buis!

Na afname (of in ontvangst nemen van lichaamsmateriaal) verplicht aanvraagformulier paraferen en tijd afname invullen.

Informatie:

RST buis (oranje dop) mag gebruikt worden als vervanger SST II buis (gele dop). Alleen voor de analyses chemie/tumormerkers/hormonen welke op het laboratorium MZH uitgevoerd worden.

Deze RST mag ALLEEN gebruikt worden door afd B1 bij afname uit een port-a-cath (PAC).

Afnameschema volwassen



Afnameschema kinderen



Bijlage Procedure SOP	Code: 3778	Versie	16
		Publicatiedatum	14-02-2024
Schematisch overzicht analyses uit 1 buis (BPD/website)	Pagina 3 van 3	Controledatum	14-02-2026

Geheugenpoli Glucose Vit. B₁ (na afname in donker bewaren). Bloedbeeld, diff. BSE Kalium, natrium, calcium, alk. fosfatase, gamma GT, LD, albumine, ureum, ASAT, ALAT, kreatinine TSH, Vit. B₁₂, Foliumzuur eGFR (CKD-EPI), totaal eiwit	Enting Bloedgroep/Rh / IRA 4 ml EDTA HbsAg / HIV (as+ag), TPHA Kreatinine klaring Kreatinine Afname binnen 48 uur na start verzamelen urine (internisten mag tot ten hoogste 5 dgn. geleden). 24 uurs urine		Volwassenen (x = aantal keer mengen na afname) 1. Kweek (eerst aëroob, dan anaëroob) 8x, desinfecteer dop vóór afname. 2. 9N Citraat (LBL2.7, licht blauwe dop) 3-4x 3. CAT (ROO6.0 rode dop) 5-6x 4. Z Vacuette (ROO10.0 rode dop) 5-6x (alléén voor LMI transfusie) 5. SST II klein (OKG3.5 gele dop) 6x 6. SST II grote (OKG5.0 gele dop) 6x 7. RST buis (oranje dop) 5-6x 8. LH PST II (LGR4.5 licht groene dop) 8-10x 9. LH (DGR6.0 donker groen) 8-10x 10. K2EDTA (LAV3.0 licht paarse dop) 8-10x 11. K2 EDTA (LAV4.0 donker paarse dop) 8-10x 12. K2EDTA: Vacuette (LAV10.0 donker paarse dop) 8-10x (alléén voor LMI transfusie) 13. Cell-Free DNA BCT (eerst buis met rode dop) bruin/zwart gevlekte dop 10x 14. Na-heparine (DBL6.0 onkerblauwe dop) 8-10x 15. NaF (GRY4.0 grijze dop) 8-10x Afnameschema (zie blz. 2)	Kinderen (x = aantal keer mengen na afname) 1. Kweek (roze dop) 8x, desinfecteer dop vóór afname. 2. 9N Citraat (LBL2.7, licht blauwe dop) 3-4x 3. CAT (ROO6.0 rode dop) 5-6x 4. Z Vacuette (ROO10.0 rode dop) 5-6x (alléén voor LMI transfusie) 5. SST II klein (OKG3.5 gele dop) 6x 6. SST II grote (OKG5.0 gele dop) 6x 7. RST buis (oranje dop) 5-6x 8. LH PST II (LGR4.5 licht groene dop) 8-10x 9. LH (DGR6.0 donker groen) 8-10x 10. K2EDTA (LAV3.0 licht paarse dop) 8-10x 11. K2 EDTA (LAV4.0 donker paarse dop) 8-10x 12. K2EDTA: Vacuette (LAV10.0 donker paarse dop) 8-10x (alléén voor LMI transfusie) 13. Na-hepar. (DBL6.0 donkerblauwe dop) 8-10x 14. NaF (GRY4.0 grijze dop) 8-10x Afnameschema (zie blz. 2)
Jaarcontrole (diabetes) Cholesterol, HDL/LDL, triglyceriden, kreatinine+eGFR HbA1c Glucose Urine (albumine en alb/kreat ratio)	SMK : Meetcentrum Bloedbeeld ALAT, kreatinine, eGFR (CKD-EPI), CRP SMK : DMARD Bloedbeeld ALAT, kreatinine, eGFR (CKD-EPI), alk. fosfatase	CVRM Cholesterol, HDL/LDL, triglyceriden, chol/HDL ratio, kreatinine+eGFR Glucose Urine (albumine en alb/kreat ratio)	Micro bloedafname EDTA=Lavendel NAF=grijs Gel=Geel Droog=rood  Volgorde van afname Vóór afname lab. bellen m.b.t. hoeveelheid afnamemateriaal. Mengen:Paars 8-10x, grijs 10x Geel: 5x Rood: -	